

# Instruktion angående säkerhet och underhåll av individuellt utprovade hjälpmedel (gr 3)

Förvaltning: Social- och omsorgsförvaltningen  
Dokumenttyp: Stöd och vägledning  
Dokumentansvarig: Medicinskt ansvarig för rehabilitering  
Dokumentnamn: AD-madrasser, luftfyllda  
Utfärdad: 2009-09-08  
Reviderad: 2018-10-15  
Dnr Än: 2017-288  
Dnr SON: 2017-201

# AD-madrasser, luftfyllda

Läs alltid hjälpmedlets bruksanvisning. Denna instruktion är endast ett komplement till bruksanvisningen. Se bruksanvisning angående hjälpmedlets vikt. Vid förändrad personvikt, ta kontakt med ansvarig arbetsterapeut/fysioterapeut.

## Säkerhet vid användning

- Kontrollera dagligen den luftfyllda madrassen, så att den är fylld med rätt mängd luft.
- Undersök brukarens hud dagligen. Om rodnad uppstår eller om huden blir skadad, kontakta ansvarig arbetsterapeut.
- För att få bästa effekt ska så lite bäddutrustning som möjligt vara placerat mellan brukaren och madrassen.
- Aggregatet får inte övertäckas, det får inte heller placeras i soffa eller fåtölj, det finns då risk för brand.
- Undvik att madrassen kommer i kontakt med vassa föremål.
- AD-madrass utesluter inte regelbunden lägesändring.
- Säkerhetsavstånd till sänggrind bör beaktas på grund av madrassens höjd.

## Underhåll av hjälpmedel

- Luftmängden ska kontrolleras så att brukaren inte ligger igenom underlaget. För korrekt luftmängd, se bruksanvisning.
- Kontrollera att elkablar, kontakter och luftslangar är hela och inte ligger i kläm.
- Kontrollera att luftslangar är förankrade i aggregatet.
- Rengör aggregatet regelbundet så att inte damm orsakar överhettning, se bruksanvisning.
- Madrass och/eller överdrag rengörs vid behov enligt märkning eller anvisning i bruksanvisningen.