

Instruktion angående säkerhet och underhåll av individuellt utprovade hjälpmedel (gr 3)

Förvaltning: Social- och omsorgsförvaltningen
Dokumenttyp: Stöd och vägledning
Dokumentansvarig: Medicinskt ansvarig för rehabilitering
Dokumentnamn: Duschstol med hjul, med eller utan tiltfunktion
Utfärdad: 2009-09-08
Reviderad: 2018-10-15
Dnr Än: 2017-264
Dnr SON: 2017-201

Duschstol med hjul, med eller utan tiltfunktion

Läs alltid hjälpmedlets bruksanvisning. Denna instruktion är endast ett komplement till bruksanvisningen. Se bruksanvisning angående hjälpmedlets maxvikt. Vid förändrad personvikt, ta kontakt med ansvarig arbetsterapeut/fysioterapeut.

Säkerhet vid användning

- Barriär/tvärslå, som är ett tillbehör, är inte avsedd att fungera som säkerhetsbälte. Vid användning av denna bör ej brukaren lämnas ensam, det finns risk för personskada. Får endast användas om brukaren samtycker till åtgärden.
- Det finns risk för urglidning om fotstöden inte sitter på plats.
- Kör baklänges över trösklar, annars finns risk för urglidning.
- Brukaren kan klämma sig när duschstolen placeras över toalettstolen samt när bäckenet sätts dit eller tas bort.
- Vid överflyttning i/ur duschstol ska den alltid vara bromsad.

Underhåll av hjälpmedel

- Kontrollera att fotstöd/benstöd finns monterade på duschstolen.
- Kontrollera att armstöd, sits, ryggstöd och tillbehör är hela och sitter fast.
- Kontrollera på de duschstolar som är höj- och sänkbara att "clips/sprintar" finns och sitter fast.
- Kontrollera att bromsarna går att låsa samt att duschstolen är lätt att manövrera och att inget missljud kan höras.
- Vid rengöring används fuktig trasa och mildt rengöringsmedel, se även bruksanvisning.