

# Instruktion angående säkerhet och underhåll av individuellt utprovade hjälpmedel (gr 3)

Förvaltning: Social- och omsorgsförvaltningen  
Dokumenttyp: Stöd och vägledning  
Dokumentansvarig: Medicinskt ansvarig för rehabilitering  
Dokumentnamn: Komfortrullstol  
Utfärdad: 2009-09-08  
Reviderad: 2018-10-15  
Dnr Än: 2017-279  
Dnr SON: 2017-201

# Komfortrullstol

Läs alltid hjälpmedlets bruksanvisning. Denna instruktion är endast ett komplement till bruksanvisningen. Se bruksanvisning angående hjälpmedlets maxvikt. Vid förändrad personvikt, ta kontakt med ansvarig arbetsterapeut/fysioterapeut.

## Säkerhet vid användning

- Vid överflyttning i och ur rullstol ska rullstolen alltid vara bromsad om inte annan instruktion har getts.
- Se till att tippskydden är nedfällda.
- Komfortrullstolen ersätter inte brukarens behov av att lägga sig och vila i sängen under dagen. Tiltfunktionen på komfortrullstolen är till för att brukaren ska kunna få en mer varierad sittställning.
- Behöver komfortrullstolen tiltas framåt för att exempelvis underlätta vid matsituationen ska den alltid regleras bakåt efter måltiden, annars finns risk för urglidning.
- Lägg inte en extra dyna på befintlig rullstolsdyna. Det ökar tipprisken.
- Kör brukaren i rullstolen med omdöme. Var observant på att brukaren alltid har fötterna placerade på fotplattorna och armarna på armstöd/bord. Vid trånga passager finns klämrisk.

## Underhåll av hjälpmedel

- Kontrollera att rullstolens däck är välpumpade.
- Kontrollera att bromsarna fungerar och att tippskydden är rätt inställda.
- Kontrollera att tiltningsfunktion samt ryggvinkling fungerar.
- Avlägsna damm och smuts från länkhjulsnaven (de främre hjulen).
- Kontrollera att alla delar på rullstolen är hela och förankrade samt att rullstolen är lätt att manövrera och inget missljud hörs.
- Vid rengöring av rullstolen används mildt rengöringsmedel och fuktig trasa. Se även bruksanvisning.

Lagning av punktering och byte av slang och däck får brukaren bekosta själv.