

Instruktion angående säkerhet och underhåll av individuellt utprovade hjälpmedel (gr 3)

Förvaltning: Social- och omsorgsförvaltningen
Dokumenttyp: Stöd och vägledning
Dokumentansvarig: Medicinskt ansvarig för rehabilitering
Dokumentnamn: Manuell rullstol
Utfärdad: 2009-09-08
Reviderad: 2018-10-15
Dnr Än: 2017-274
Dnr SON: 2017-201

Manuell rullstol

Läs alltid hjälpmedlets bruksanvisning. Denna instruktion är endast ett komplement till bruksanvisningen. Se bruksanvisning angående hjälpmedlets maxvikt. Vid förändrad personvikt, ta kontakt med ansvarig arbetsterapeut/fysioterapeut.

Säkerhet vid användning

- Vid överförflyttning i och ur rullstol ska rullstolen alltid vara bromsad.
- Vid manuell överförflyttning ska alltid benstöden tas bort eller vinklas åt sidan för att minska risken för fallolyckor.
- Se alltid till att tippskydden är nedfällda.
- Lite luft i däcken ger en nedsatt bromsfunktion.
- Kör brukaren i rullstolen med omdöme.
- Var observant på att brukaren alltid har fötterna placerade på fotplattorna och armarna på armstöd/bord. Vid trånga passager finns klämrisk.
- När rullstolen behöver lyftas ska den alltid lyftas i rullstolens ram.

Underhåll av hjälpmedel

- Kontrollera att rullstolens däck är välpumpade.
- Kontrollera att bromsarna fungerar och att tippskydden är rätt inställda.
- Avlägsna damm och smuts från länkhjulsnaven (de främre hjulen).
- Kontrollera att alla delar på rullstolen är hela och förankrade samt att rullstolen är lätt att manövrera och inget missljud kan höras.
- Vid rengöring av rullstolen används mildt rengöringsmedel och fuktig trasa. Se även bruksanvisning.

Lagning av punktering och byte av slang och däck får brukaren bekosta själv.