

# Instruktion angående säkerhet och underhåll av individuellt utprovade hjälpmedel (gr 3)

Förvaltning: Social- och omsorgsförvaltningen  
Dokumenttyp: Stöd och vägledning  
Dokumentansvarig: Medicinskt ansvarig för rehabilitering  
Dokumentnamn: Rollator  
Utfärdad: 2009-09-08  
Reviderad: 2018-10-15  
Dnr Än: 2017-268  
Dnr SON: 2017-201

# Rollator

Läs alltid hjälpmedlets bruksanvisning. Denna instruktion är endast ett komplement till bruksanvisningen. Se bruksanvisning angående hjälpmedlets maxvikt. Vid förändrar personvikt, ta kontakt med ansvarig arbetsterapeut/fysioterapeut.

## Säkerhet vid användning

- Rollatorn får endast användas som uppresningsstöd, gångstöd och som sittstöd vid stillastående.
- Den får inte användas för persontransporter.
- Rollatorn ska alltid bromsas när sittbrädan ska användas eller när rollatorn används som uppresning från sittande.
- Tänk på att köregenskaperna på rollatorn kan förändras vid tungt lastad korg/körhandtag samt vid lutande underlag.

## Underhåll av hjälpmedel

- Kontrollera att skruvar, hjul och handtag sitter fast.
- Kontrollera att bromsarna fungerar och att rollatorn inte drar snett.
- Rollatorn rengörs med mildt rengöringsmedel, se bruksanvisning.
- Kontrollera att säkerhetsspärren (som motverkar hopfällning) är hel och fungerar.
- Rollatorns hjul ska vara lätta att manövrera och inget missljud ska höras.