

Instruktion angående säkerhet och underhåll av individuellt utprovade hjälpmedel (gr 3)

Förvaltning: Social- och omsorgsförvaltningen
Dokumenttyp: Stöd och vägledning
Dokumentansvarig: Medicinskt ansvarig för rehabilitering
Dokumentnamn: Tippbräda el-funktion
Utfärdad: 2009-09-08
Reviderad: 2018-10-15
Dnr Än: 2017-282
Dnr SON: 2017-201

Tippbräda el-funktion

Läs alltid hjälpmedlets bruksanvisning. Denna instruktion är endast ett komplement till bruksanvisningen.

Säkerhet vid användning

- Vid höj- och sänkning, se till att ingenting kommer i kläm mellan ramdelarna.
- Vid tippning måste bänken först höjas för att undvika att fotplattan tar i golvet och reser bänken i framkant så att framhjulen inte har golvkontakt.
- Hjulen ska alltid vara låsta vid tippning. De främre hjulen ska vara riktade framåt för att undvika att tippbrädan rullar vid tippning av brukaren.
- Brukaren får aldrig lämnas ensam på tippbrädan.
- Kontrollera att alla beslag och tillbehör är fastsatta ordentligt och sitter på rätt plats.
- Förflytta inte brukaren på tippbrädan vid längre distanser, över mattkanter, ojämna underlag eller utomhus.
- Tippbrädan är inte avsedd för våtutrymmen och får inte laddas där.
- Sadelgjordar som är slitna ska bytas ut med jämna mellanrum.

Underhåll av hjälpmedel

- Underhållsladdning av batteriet ska ske kontinuerligt, se bruksanvisning.
- Sadelgjordar kan rengöras med mildt rengöringsmedel.
- Kontrollera med jämna mellanrum att kardborrelåsen på sadelgjordar är rena och har god vidhäftning.
- Rengöring av underredet med lätt fuktad trasa, får ej högtryckstvättas eller spolats med vatten.
- Dynorna rengörs med mildt rengöringsmedel och fuktig trasa.
- Sprittvätta inte vävplasten, detta ger sprickbildning. Använd andra desinficerande rengöringsprodukter.
- Kolla med jämna mellanrum att alla delar är hela och oskadda.