

Instruktion angående säkerhet och underhåll av individuellt utprovade hjälpmedel (gr 3)

Förvaltning: Social- och omsorgsförvaltningen
Dokumenttyp: Stöd och vägledning
Dokumentansvarig: Medicinskt ansvarig för rehabilitering
Dokumentnamn: Tippbräda manuell
Utfärdad: 2009-09-08
Reviderad: 2018-10-15
Dnr Än: 2017-287
Dnr SON: 2017-201

Tippbräda manuell

Läs alltid hjälpmedlets bruksanvisning. Denna instruktion är endast ett komplement till bruksanvisningen. Se bruksanvisning angående hjälpmedlets maxvikt. Vid förändrad personvikt, ta kontakt med ansvarig arbetsterapeut/fysioterapeut.

Säkerhet vid användning

- Man har bäst kontroll på brukaren och hjälpmedlet om man placerar brukaren på tippbrädan när den är i vågrätt position.
- Brukaren ska vara väl fastspänd innan man vinklar till lodrät position.
- När brukaren placeras på tippbrädan ska hjulen vara bromsade och de främre hjulen placerade framåt för att undvika att tippbrädan rullar vid vinkling av tippbrädan.
- Brukaren får aldrig lämnas ensam på tippbrädan.
- Kontrollera att alla beslag och tillbehör är ordentligt fastsatta och sitter på rätt plats.
- Förflytta inte brukaren på tippbrädan vid längre distanser, över mattkanter, ojämna underlag eller utomhus.
- Vid tippning av brukare bör man vara två personer.

Underhåll av hjälpmedel

- Rengör ramdelar och liggyta med fuktad trasa och mildt rengöringsmedel.
- Spritvätta inte liggytan, detta kan ge sprickbildning. Använd andra desinficerande rengöringsmedel.
- Kontrollera att hjulen löper lätt och att hjullåsning samt riktningsspärr fungerar.
- Kontrollera att inga yttre skador finns på ram och liggyta.
- Kontrollera att alla fixeringsbälten är hela och låser bra.