

# Instruktion angående säkerhet och underhåll av individuellt utprovade hjälpmedel (gr 3)

Förvaltning: Social- och omsorgsförvaltningen  
Dokumenttyp: Stöd och vägledning  
Dokumentansvarig: Medicinskt ansvarig för rehabilitering  
Dokumentnamn: Vårdsäng  
Utfärdad: 2009-09-08  
Reviderad: 2018-10-15  
Dnr Än: 2017-280  
Dnr SON: 2017-201

# Vårdsäng

Läs alltid hjälpmedlets bruksanvisning. Denna instruktion är endast ett komplement till bruksanvisningen. Se bruksanvisning angående hjälpmedlets maxvikt. Vid förändrad personvikt, ta kontakt med ansvarig arbetsterapeut/fysioterapeut.

## Säkerhet vid användning

- Sängen ska alltid vara bromsad vid omvårdnad av brukaren i sängen eller vid överförflyttning i/ur sängen. Minst ett hjul i huvudändan och ett hjul vid fotändan ska vara bromsat (gäller ej vid centralbroms).
- Lämna alltid sängen bromsad och i lägsta läget. Manöverdosan bör hänga på sängsidan eller sänggaveln när den inte används.
- När sängen används eller flyttas, se till att elkablar, vägguttag och manöverdosa inte kommer i kläm eller skadas.
- Risk för personskada finns vid användning av sänggrind. I samband med höjning av ryggstöd bör man observera så att patientens arm/ben ej kommer i kläm i sänggrind.
- Lyftbågen ska användas av brukaren i sängen. Används lyftbågen utåt över sängsidan finns risk att sängen välter.
- Vårdsäng får ej monteras ned och flyttas av privatperson. Hjälpmedelscentrums tekniker ska alltid kontaktas vid nedmontering.

## Underhåll av hjälpmedel

- Kontrollera att sängram och eventuella sänggrindar, lyftbåge är hela och förankrade.
- Kontrollera att manöverdosa/elkablar är hela samt att sängens elfunktioner (ryggfällning, sänglyft) fungerar.
- Kontrollera att samtliga bromsar fungerar.
- Vid rengöring av underredet används fuktig trasa och mildt rengöringsmedel. Se även bruksanvisning.
- Kontrollera att sängen är lätt att manövrera och att inget missljud hörs.